



抗体検査の手順 検査結果は約 8 分後

<p>1</p>  <p>採血する部位を アルコール綿で消毒</p>	<p>2</p>  <p>採血用針のフタを外す</p>	<p>3</p>  <p>指先に採血用針を刺す</p>	<p>4</p>  <p>米粒程の血液を出す</p>
<p>5</p>  <p>筒の部分 全部に入れる</p> <p>スポイドで血液を 吸い取る</p>	<p>6</p>  <p>液漏れ注意</p> <p>血液と薬剤と混ぜる</p>	<p>7</p>  <p>スポイド上部の フタを外す</p>	<p>8</p>  <p>プレートの丸い穴に スポイドの混合液を 4 滴入れる</p>
<p>9</p>  <p>8分間待つ</p>	<p>10</p>  <p>プレートを検査装置に 差し込む</p>	<p>11</p>  <p>検査結果を印刷する</p>	<p>IgM / IgG の 数 値 を 記録していきましょう！ 次回の数値と見比べて 抗体価を管理しましょう！</p>

抗原検査の手順 検査結果は約 15 分後

<p>1</p>  <p>鼻腔から採取 咽頭から採取 口内</p> <p>綿棒で検体を採取する</p>			<p>2</p>  <p>液漏れ注意</p> <p>スポイドの先で 薬剤容器のフタを破る</p>
<p>3</p>  <p>液漏れ注意</p> <p>検体を薬剤に浸す</p>	<p>4</p>  <p>液漏れ注意</p> <p>検体と薬剤を ゆっくり混ぜる</p>	<p>5</p>  <p>スポイド上部の フタを外す</p>	<p>6</p>  <p>プレートに試薬を 4 滴入れる</p>
<p>7</p>  <p>15分間待つ</p>	<p>8</p>  <p>プレートを検査装置に 差し込む</p>	<p>9</p>  <p>検査結果を印刷する</p>	<p>抗 原 検 査 は 現 在 の 感 染 状 態 を 確 認 で き ま す 。 数 値 と 参 考 基 準 を 見 比 べ て 自 己 状 態 を 管 理 し ま し ょ う ！</p>